



Introducción

Se pueden configurar 8 posibles alarmas vibratorias silenciosas como recordatorios convenientes y discretos para ayudar a adultos y niños a recordar hacer algo durante el día o la noche.

Hay dos botones de programación que se pueden sentir en el costado de la correa. Sostenga con los botones en la parte superior.

Para verificar la hora: presione el botón derecho una vez. La hora aparecerá en la pantalla.

Para verificar el nivel de la batería: Presione el botón derecho dos veces. Aparecerá el porcentaje de nivel de batería. (Si la batería está por debajo del 20%, el reloj se apagará para guardar la configuración de la alarma).

Para revisar todas las alarmas: presione repetidamente el botón izquierdo. El número de alarma es seguido por la hora de la alarma. El LED mostrará: A1OF, 08.08, A2OF, 09.00, A3OF, 10.00 y así sucesivamente, para las 8 alarmas.

A la hora de la alarma, el reloj vibra y se muestra la hora. La alarma 1 vibra durante 40 segundos (alarma de despertador). Las alarmas 2-8 vibran durante 20 segundos.

Cuando la alarma del reloj vibra, puede presionar cualquier botón para detener la alerta.

Al configurar el reloj, mantenga presionado el botón correspondiente durante 3 segundos para ingresar a la configuración. Una pulsación corta ajusta el número.

Practique inicialmente con la configuración, ya que lleva un tiempo acostumbrarse a ella. El LED se apaga rápidamente (saliendo de la configuración) si no se le solicita que presione los botones.

Si no se presiona nada, el reloj saldrá de la configuración después de 4 segundos.

Los relojes se suministran con tiempos de alarma de demostración configurados de fábrica. Ajuste las alarmas para satisfacer sus necesidades.

Establecer la hora

1, presione el botón derecho una vez; aparecerá el reloj de 24 horas.

2, con el LED encendido, presione nuevamente el botón derecho y manténgalo presionado durante 3 segundos para configurar las horas.

4, las horas aparecerán solas a la izquierda (los puntos centrales parpadearán).

5, con el LED aún encendido, presione el botón izquierdo para aumentar, el botón derecho para disminuir.

6, cuando la hora es correcta y con el LED encendido, presione el botón derecho durante 3 segundos para configurar los minutos.

7, los minutos aparecerán solos a la derecha (los puntos centrales parpadearán).

8, con el LED encendido, presione el botón izquierdo para aumentar, el botón derecho para disminuir.

Cuando los minutos son correctos, se completa la configuración del tiempo.

Si no se presiona nada, el reloj saldrá de la configuración después de 4 segundos.

Configurar las alarmas

1, enciende / apaga las alarmas.

Alarma 1: presione el botón izquierdo una vez. Con A1OF (Alarma 1 DESACTIVADA) o A1ON (Alarma 1 ACTIVADA) en pantalla, presione el botón derecho una vez para activar o desactivar.

2, establece la hora de la alarma.

Alarma 1: con A1ON en pantalla, presione el botón izquierdo una vez para ver la hora de la alarma en la pantalla LCD.

A, luego presione el botón izquierdo durante 3 segundos para ingresar a la configuración y ajustar las horas. Las horas aparecerán en el lado izquierdo.

B, presione el botón izquierdo para aumentar, el botón derecho para disminuir.

C, una vez a la hora correcta, presione el botón izquierdo durante 3 segundos para ajustar los minutos. Los minutos aparecerán en el lado derecho.

D, presione el botón izquierdo para aumentar, el botón derecho para disminuir. Cuando los minutos son correctos, se activa la alarma 1.

Ahora programe cualquier alarma adicional requerida (2-8):

Para activar / desactivar una alarma, asegúrese de que se muestre la alarma correcta presionando el botón izquierdo hasta que se muestre (es decir, A2OF, A3OF, etc.) y presione el botón derecho una vez para cambiarla a ON u OFF.

Configure los tiempos para las alarmas 2-8: con la alarma correcta mostrada (es decir, A2ON, A3ON, etc.) presione el botón izquierdo una vez para ver la hora de la alarma en el LED. Luego siga las instrucciones ABCD anteriores.

Recarga

Retire el reloj de la carcasa de goma y cárguelo con el cable USB provisto.

El reloj se carga en aproximadamente 1 hora.

Al reemplazar el reloj en la carcasa de goma, asegúrese de que los botones del reloj estén colocados correctamente en la correa debajo de los botones de goma.

Duración de la batería

Duración de la batería entre cargas: aproximadamente 6 días, aunque esto dependerá de la cantidad de alarmas configuradas y el tiempo que las vibraciones pueden funcionar / la luz LED de frecuencia está encendida. Al 20% o menos, el LED mostrará __:00 después del tiempo como recordatorio para recargar.

Recomendamos que Vibratime no se recargue todos los días a menos que sea necesario.

El Vibratime no es resistente al agua: no lo use en la ducha / baño o al nadar.

Garantía: 12 meses desde la compra.

Otros colores de correa intercambiables también disponibles.

Pivotell Ltd. PO Box 108, Saffron Walden, Essex, CB11 4WX, Reino Unido 0044 1799 550979